

KIERUNEK WŁÓKNA/
FIBRE DIRECTION



210 mm

POLE TEKSTOWE/
TEXT BOX
109 mm x 409 mm

linia złożenia/
folding line

1

Material/ Material:	ULOTKA INFORMACYJNA/ LEAFLET:		
Wzór/ Artwork:	USTR-2328-000_2		
Preparat/ Product:	Starazolin HydroBalance PPH		
Adnotacje/ Annotations:	Rozmiar ulotki/Leaflet size: 130 x 420 mm ± 1 mm Format ulotki po złożeniu/Leaflet size after folding: 130 x 210 mm ± 0,5 mm Złożenie wykonuje drukarnia/Folding is made by printing house Złożenie musi być zaprasowane/Folding should be ironed		
Czcionki/ Fonts:	Nazwa/Name: Panton 15 pt, Arial 9 pt Tekst/Text: Times New Roman 9 pt		
Gramatura/ Weight:	40 g/m ²	Farmakod/ Pharmacode:	228
Kolorystyka/ Colours:	■ P. 2767 U	Opracował/ Prepared by:	05.12.2018 W. Streng



Polfa Warszawa S.A.

Starazolin® HydroBalance PPH

(Hialuronian sodu, roztwór 1 mg/ml)

Nawilżające krople do oczu, 3 x 5ml, 2 x 5 ml, 1 x 5 ml

UWAGA: Instrukcja zawiera informacje na temat bezpiecznego sposobu i zasad użytkowania kropli. Należy uważnie zapoznać się z treścią i zachować instrukcję, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Skład:

hialuronian sodu, chlorek sodu, kwas borowy, tetraboran sodu, edetynian disodu, poliheksanid (PHMB), woda wysokococzyszczona.

Wskazania do stosowania

Krople **Starazolin HydroBalance PPH** wykazują skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. Przynoszą szybką ulgę przy odczuwaniu suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia piasku pod powiekami. Preparat **Starazolin HydroBalance PPH** jest szczególnie wskazany w przypadku:

- narażenia narządu wzroku na działanie drażniących czynników środowiskowych takich jak: kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (centralne ogrzewanie, sauna), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki, chlorowana woda
- obniżonej częstości mrugania spowodowanej oglądaniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagających długotrwałej koncentracji wzroku min. długotrwała praca przed ekranem monitora, prowadzenie samochodu itp.
- zbyt małej ilości łez lub zmiany ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia
- osób noszących soczewki kontaktowe.

Krople **Starazolin HydroBalance PPH** mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów.

Produkt sterylny – wyprodukowano w warunkach aseptycznych.**Sposób użycia**

Preparat do samodzielnego stosowania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.

Należy umyć ręce przed zastosowaniem preparatu. Krople **Starazolin HydroBalance PPH** należy stosować miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje się 1 lub 2 krople, od 3 do 5 razy na dobę. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości butelki.

Jeżeli po usunięciu czynników drażniących, objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie stosowania kropli, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem specjalistą.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować kropli **Starazolin HydroBalance PPH** w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Środki ostrożności

- Przed zastosowaniem preparatu sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie stosować po upływie terminu ważności (☞) zamieszczonego na butelce i tekturowym pudełku. Krople należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
- Przed pierwszym użyciem upewnić się, że opakowanie jest oryginalnie zamknięte. Jeśli banderola nakrętki jest zerwana, nie należy używać preparatu.
- Nie stosować w przypadku zmiany zabarwienia lub zmętnienia roztworu.
- Szczelnie zakręcić butelkę po każdym użyciu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, krople **Starazolin HydroBalance PPH** należy stosować na końcu, zachowując 5 minut przerwy od podania poprzedniego preparatu.

Ostrzeżenia

- Nie należy mieszać, ani rozcieńczać kropli **Starazolin HydroBalance PPH** z innymi płynami, ponieważ może to wpłynąć na utratę sterylności oraz zmianę skuteczności kropli.
- Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe powinni skontaktować się z lekarzem specjalistą przed zastosowaniem jakichkolwiek preparatów okulistycznych.

Możliwe działania niepożądane

Preparat jest dobrze tolerowany. U niektórych osób może wystąpić zaczerwienienie spojówek, uczucie pieczenia lub przemijające „zamglenie” widzenia. W przypadku pojawienia się nieustępującego uczucia dyskomfortu lub podrażnienia należy przerwać stosowanie kropli i skontaktować się z lekarzem specjalistą.



Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa, Polska
tel. +48 22 691 39 00
www.polfawar.com.pl

Dostępne opakowania: 3 x 5 ml, 2 x 5 ml, 1 x 5 ml

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Data aktualizacji instrukcji: listopad 2018 r.

STERILE A

CE 0197

Znaczenie zastosowanych symboli:

STERILE A

Produkt sterylny



Należy zapoznać się z instrukcją używania



+25°C



Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.



Użyć do: (termin ważności)



Wytwórca

LOT

Numer serii